

ProktiQ to wyrób medyczny wskazany w procesach zaburzeń odbytu i odbytnicy, takich jak hemoroidy zewnętrzne, swędzenie lub pieczenie odbytu. Dzięki swojej formule wyrób tworzy niewidoczny film z efektem bariery, zdolny do przywrócenia prawidłowego poziomu nawilżenia i naturalnego dobrostanu błon śluzowych. **ProktiQ** chroni przed podrażnieniami i przekrwieniem okolic odbytu, pozwalając na szybkie złagodzenie uczucia dyskomfortu.

Skład: woda, woda z liści ślazu dzikiego, żel z aloesu, gliceryna, escyna, wyciąg z nostrzyka żółtego, fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, dioctan glutaminianu tetrasodu, sorbinian potasu, kwas cytrynowy, glikol propylenowy, hydrolat z rumianku pospolitego, monohydrat glukozy, mleczan sodu, PCA sodu, glicyna, fruktoza, mocznik, niacynamid, inozytol, benzoesan sodu, kwas mlekowy, oczar wirginijski, sorbitol, alkohol benzylowy, hydrolizowane białko pszenicy, pantenol, mleczan mentylu, uwodorniony olej rycynowy PEG-40, akrylany/c10-30 kopolimer kwasu akrylowego, karbomer, olej ze słodkich migdałów, mieszanina tokoferoli, octan tokoferylu, bisabolol, dikaprylan/dikaprynian glikolu propylenowego, olej z otrębów ryżowych, tokotrienole, trietanoloamina, mentol, PPG-26-Buteth-26, Trideceth-9, etoksydiglikol.

Dawkowanie: nakładać niewielką ilość produktu na zmieniony obszar 3-4 razy dziennie.

- 1) Przed aplikacją delikatnie umyć i osuszyć zmienione obszary.
- 2) Otworzyć tubkę i wkręcić kaniulę znajdującą się w opakowaniu.
- 3) Ścisnąć tubkę, aż kaniula wypełni się żelem.
- 4) Ścisnąć tubkę do momentu nałożenia wystarczającej ilości produktu.
- 5) Nałożyć na obszar zewnętrzny.
- 6) Wyjąć kaniulę, dokładnie ją umyć i odłożyć do przechowania.
- 7) Upewnić się, że tubka jest prawidłowo zamknięta.

Po aplikacji zaleca się unikanie wypróżnienia przez co najmniej 20-30 minut, aby uniknąć przedwczesnego usunięcia produktu. Okresowo odnawiać w razie potrzeby i zawsze po myciu.

Warunki przechowywania: wyrób należy przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C z dala od światła i źródeł ciepła. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia: wyrób nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas użytkowania, jednak zaleca się:

- stosowanie zewnętrzne;
- nie stosować w przypadku ran lub urazów odbytu i okolicy odbytu;
- po każdym użyciu dokładnie umyć kaniulę;
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci;
- nie przekraczać zalecanej dawki;
- nie stosować po upływie terminu ważności; termin ważności odnosi się do produktu nienaruszonego i prawidłowo przechowywanego;
- w przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniego leczenia;
- nie stosować produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone;
- w przypadku stosowania w okresie ciąży, karmienia piersią i u dzieci lub jednoczesnego stosowania z lekami należy skonsultować się z lekarzem;
- w przypadku stosowania w okresie ciąży, karmienia piersią i u dzieci należy skonsultować się z lekarzem;
- nieprawidłowe przestrzeganie ostrzeżeń, sposobów stosowania, a także stosowanie produktu przez więcej niż jedną osobę, może wpłynąć na skuteczność produktu lub spowodować pogorszenie istniejących problemów lub pojawienie się problemów, które wcześniej nie występowały.

Ważne jest, aby zgłaszać lekarzowi lub farmaceucie wystąpienie działań niepożądanych, które nie zostały wymienione w tej instrukcji używania.

Interakcje i niezgodności: nie są znane ani zgłaszane żadne interakcje z innymi lekami ani niezgodności z innymi produktami stosowanymi w leczeniu hemoroidów lub szczelin odbytu.

Działania niepożądane: w normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania nie są obecnie znane żadne działania niepożądane związane konkretnie ze stosowaniem tego produktu. Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki produktu.

Postać: żel w tubce o pojemności 30 ml z kaniulą wielokrotnego użytku.

Dystrybutor: BioceriQ Pharma sp. z o.o.
ul. Potażowa 43A, 02-400 Warszawa

BioceriQ Pharma



Producent: Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Włochy



Wyrobu medycznego nie wolno wyrzucać do ścieków ani odpadów domowych. Należy zapytać farmaceutę o sposób utylizacji wyrobów medycznych, które nie są już używane. Pomocze to chronić środowisko.